

FACE BEAUTY CLINIC 1010



FACE BEAUTY CLINIC 1010 raggruppa al suo interno tutte le funzioni richieste ad un'apparecchiatura polifunzionale per trattamenti al viso.

10 trattamenti disponibili
3 programmi specifici

VACUUM SPRAY - Il trattamento di aspirazione è un validissimo ausilio per liberare i follicoli dai residui di trucco, sebo, ecc. Inoltre l'azione aspirante stimola l'attività cutanea e le secrezioni possono defluire liberamente. Utilissimo anche per eliminare i punti neri e per ritardarne e contrastarne la formazione.

N°2 tubetti gomma completo d'attacco per campanelle Vacuum ± spray;
N°2 boccetta spray;
N°3 campanelle aspira comedoni.

STIMUL - Elettrostimolazione bipolare, per tonificare dolcemente ed in modo selettivo gruppi muscolari e cute che risultino atoni.

N°1 manipolo elettrostimolazione viso.

BRUSH - Per mezzo di spazzole rotanti, intercambiabili sull'apposito manipolo di trattamento, si attua una pulizia profonda delle parti interessate, unitamente ad una più omogenea distribuzione degli specifici prodotti cosmetologici utilizzati.

N°1 micro motore per spazzole SP.;
N°1 Spazzola diam. 20mm.,
N°1 Spazzola diam. 40mm morbida pelo capra;
N°1 spazzola diam. 40mm dura setola;
N°1 spazzola diam. 40mm pomice.

INFRARED - È un valido aiuto per far penetrare i prodotti cosmetici nella pelle.

N°1 manipolo termopenetrante.

IONTO - Sfruttando i fenomeni ionici prodotti dalla corrente galvanica erogata dall'apparecchiatura, questa funzione permette di svolgere due tipi di

trattamento: la disincrostazione cutanea e la ionoforesi.

N°1 cavetto bifilare rosso nero;

N°1 manipolo polo;

N°1 manipolo + Kit tampone, rullo, puntale, sfera.

MOISTURE CONTROL (controllo idratazione) - Possibilità di misurare il grado di idratazione cutanea per poter determinare i trattamenti e controllarne i risultati, In dotazione un cavetto bipolare rosso e nero, un manipolo polo ed un tampone.

BLUE LIGHT (HF) - Utilizzando l'applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione generando calore all'interno dei tessuti trattati. Ha inoltre un'azione germicida.

N°1 manipolo alta frequenza H.F.

N°1 elettrodo cipolla,

N°1 cipollina.

AIR MASSAGE - Il massaggio ad aria viene eseguito ad impulsi, aspiranti e prementi, con un ritmo regolabile.

Il massaggio ad aria, simile nel suo effetto fisiologico alle varie azioni svolte dal massaggio manuale, è più uniforme e costante di quest'ultimo ed è contemporaneamente meno faticoso per l'estetista.

Tubetti di gomma completi d'attacchi per Campanelle M.B.

Campanelle:

2 pz diam. 16 mm.,

2 pz diam. 32 mm

2 pz piatte.

BIO MICROSTIMULATOR LIFTING - Produce una stimolazione a livello del microcircolo cutaneo, che a sua volta, aumenta il nutrimento, l'ossidazione e la rivitalizzazione dei tessuti

VAPORIZZATORE - completo di ozono

